

操作ボタン	詳細
<p>メインメニュー画面 ↓ [カウンセリング] [E.F.A.S 機能紹介] [紹介 No]</p> <p>メインメニュー画面 ↓ [カウンセリング] [紹介画像選択]</p> <p>↓ 紹介 No・紹介目的 を入力 [登録]</p> <p>↓ 表示順を入力 [更新]</p>	<p>1. [E.F.A.S 機能紹介] の使い方</p> <ul style="list-style-type: none"> ● [カウンセリング] を押す → ● [E.F.A.S 機能紹介] を押す。 ●画面上部中央の <u>[紹介 No]</u> で登録した紹介パターンを選びます。 <p>2. [紹介画像選択] (紹介パターンのカスタマイズの方法)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <u>[カウンセリング]</u> を押す → ● [紹介画像選択] を押す <p>上部の青色エリアで紹介パターンを登録することができます。</p> <p>①「紹介 No」と「紹介目的」を入力し、[登録] を押すと、左側緑色エリアにパターン名称が表示されます。</p>  <p>②表示させたい画像に、順番 (表示順) を付ける。</p> <p>③画面右下 [更新] を押す → 登録完了</p> <p>以降、[E.F.A.S 機能紹介] → 画面上「紹介 No」で、任意の紹介 No を選択する。</p> <p>※各紹介パターンの表示内容を変更するときは、紹介画像選択画面左上の緑色エリアで、変更する紹介パターンを選んだ状態で、表示内容を変更後、画面右下の [更新] を押すと、内容が更新されます。</p> <p>※標準搭載画像以外に、オリジナル画像で紹介パターンを作成する場合は、次ページを参考にしてください。</p>

メインメニュー画面



[カウンセリング]

[紹介画像登録]

3. [紹介画像登録] オリジナル画像の登録方法

● [カウンセリング] を押す → ● **[紹介画像登録]** を押す

[画像登録] → タイトル、説明を入力 → [ファイルを選択] でアップロードすると、サーバーの先生のデータベースに登録されます。

※保存された画像のタイトルや説明などを修正した時は、[更新] 押ししてください。

紹介画像登録

画像No	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>	タイトル (一部)	<input type="text"/>
説明 (一部)	<input type="text"/>	順序	<input type="text"/>

検索 クリア 画像登録

No	タイトル	説明	順序	画像名	開	修正日	削除
1	ちしきく	ちちちつ	0.00	IMG_1900.JPG	開	2017/08/05	削除
2	しししせ		0.00	IMG_1896.PNG	開	2017/08/05	削除

※PDF ファイルは画像に変換してからアップロードしてください。

保存された画像は、[紹介画像選択] 画面の中で [切替] を押すとオリジナル画像一覧画面に切り替わります。

紹介画像選択

紹介No 紹介目的 登録 削除

最初 前へ 次へ 最後 表示数 無制限 結果 1 ~ 21 / 21 件 切替

表示順 1		表示順 2		表示順 3	
表示順 4		表示順 5		表示順 6	

※紹介画像選択画面で、初期設定画像と任意登録画像を混在させて登録する場合、各画面で順番をつけましたら、下部の [更新] を押してから、[切替] ボタンを押してください。なお、紹介パターンにおける順番は重複しないようにしてください。

メインメニュー

↓

[カウンセリング]

↓

[画像比較]

↓

画像一覧の [表示]

押す

↓

機能紹介

4. [画像比較] の使い方

サンプル画像の**表示**を押すと表示部に表示されるので、Before After 画像を表示させ、合成機能でイーファスの画像分析機能を紹介します。

※右端の**カウンセリング「C」(オレンジ)**を押すと、**サンプル画像からなくなります。**間違っって押したときは、[サンプルデータ復元] を押してください。

※比較操作は、操作 10,11 を参照してください。

[画像比較] のサンプル画像の登録方法


通常の施術で保存された画像を、カウンセリングモードの一覧で選べる方法

↓

- 画面の左上で **[通常]** を押して、通常モードに切り替えます
 ※サーバーに保存されたすべての画像一覧に変わります
- ↓
- 患者 ID もしくは氏名で、登録したい画像を **[検索]** します
- ↓
- 利用したい画像一覧の右端 [カウンセリング] の **[C]** を押すと、
 [カウンセリング] → [画像比較] で一覧に表示、選択できるようになります
- ↓
- 画面左上 [カウンセリング] を押すと、カウンセリングモード画面に切り替わり、登録した画像を選択できるようになります。

[画像比較] のサンプル画像の解除方法

- ・一覧右端のカウンセリング列 **[C]** を押すと、画像が非表示になります
- ・上部の **[サンプルデータ復元]** を押すと、最初のサンプル画像 8 枚は復元されます



画像ID	種別番号	撮影番号	部位	撮影	コメント	表示	カウンセリング
1	8	2	立位腕部	✓	81才 女性 前屈 After	○	C
1	7	2	立位腕部	✓	81才 女性 前屈 Before	○	C
1	6	2	立位腕部	✓	51才 男性 前屈 After	○	C
1	5	2	立位腕部	✓	51才 男性 前屈 Before	○	C
1	4	2	立位腕部	✓	49才 女性 前屈 After	○	C
1	3	2	立位腕部	✓	49才 女性 前屈 Before	○	C
1	2	2	立位腕部	✓	11才 (小5) 男性 前屈 After	○	C
1	1	2	立位腕部	✓	11才 (小5) 男性 前屈 Before	○	C